



Wandklappliege L

Befestigung längsseitig

Gebrauchsanweisung




Achtung!

Die Wandklappliege darf nicht an Trockenbauwänden montiert werden. Eine Montage und Nutzung ist nur an massiven Wänden, wie aus Beton, Stein, Hohlblock- oder Kalksandsteinziegeln und monolithischem Mauerwerk zulässig. Die Montage der Wandklappliege ist immer von zwei Personen auszuführen.

1. Montage

1. Schritt: Die Standfüße der Wandklappliege ausklappen und die Liege mit den Befestigungsblechen an der Montagestelle platzieren. Die Liegefläche mit Hilfe einer Wasserwaage ausrichten und die Befestigungslöcher an der Montagestelle anreißen.

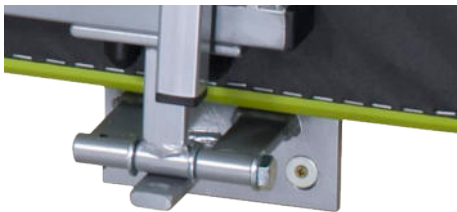

2. Schritt: Anschließend Löcher bohren und Dübel setzen. Danach kann die Wandklappliege mit 12er Schrauben und Unterscheiben befestigt werden. Dübel und Schrauben sind kein Bestandteil des Lieferumfangs der RFH-Rehatechnik GmbH.



3. Schritt: Der mitgelieferte Sicherheitsbügel ist oberhalb der hochgeklappten Liegefläche zu montieren. Damit ist die Wandklappliege gegen unbeabsichtigtes Herunterklappen zu sichern.

2. Benutzung der Wandklappliege



Die Standfüße der Liege nach oben klappen und beidseitig mit dem Schnäpper sichern.




Die Abklapp-Sicherung nach links ziehen. Dabei die Liegefläche mit der Hand sichern.

Nun können Sie die Liegefläche abklappen und auf den ausgeklappten Standfüßen abstellen.

Wenn die Liege nicht mehr genutzt wird, dann in umgekehrter Reihenfolge wieder an die Wand hochklappen und auf den ordnungsgemäßen Sitz der Abklapp-Sicherung achten!

3. Wandklappliege mit Motor (Sonderausstattung)

Bei der Ausführung der Wandklappliege mit Motor wird das Auf- und Abklappen der Liegefläche elektromechanisch ausgeführt. Die Antriebseinheit besteht aus Verstellantrieb, Steuerbox mit Netzkabel und Handbedienung.

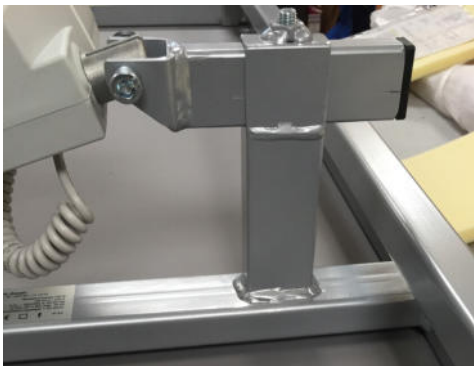

Die Stellung der Polsterplatte zur Wand um zum Boden kann an der Aufnahme des Antriebes justiert werden.

Zum Lösen und Festschrauben der Madschraube verwenden Sie bitte den beiliegenden Stiftschlüssel und verboren Sie als Sicherung die mitgelieferte Schraube (Bohrung 8,0 mm).

Die genaue Justierung des Stellmotors erfolgt mit der Imbusschraube. Zur Sicherung der Positionierung wird das Schiebestück mit Durchmesser 8 durchgebohrt und verschraubt.



Handbedienung
für Auf- und Ab-Funktion

4. Reinigung der Kunstlederfläche

Reinigungsempfehlung für skai fashion Produkte - ein Erzeugnis der Konrad Hornschuch AG

- skai-Materialien sind sehr pflegeleicht
- Säubern Sie das Material einfach mit warmen Wasser und einem feuchten Tuch.
- Besonders empfehlenswert ist die Verwendung eines handelsüblichen Micofasertuches.
- Stärkere Verschmutzungen werden einfach unter Zugabe eines milden Reinigungsmittels entfernt.
- Um zu vermeiden das Flecken in das Material eindringen, sollten die Verunreinigungen sofort entfernt werden.
- Bitte benutzen Sie keine Lösungsmittel, Chloride, Poliermittel, synthetische Reinigungsmittel, Wachspoliermittel oder Aerosolsprays.
- Regelmäßige und sorgfältige Pflege garantiert Ihnen langanhaltende Freude an Ihrem hochwertigen Polstermaterial.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel welche Öl oder Fett enthalten.
- skai-Materialien sind nicht beständig gegen chemische und Trockenreinigung.

5. Desinfektion der Kunstlederflächen

Desinfektionsmittelempfehlung der Firma Hornschuch

Sortiment-Nr. No of production line N° de gama	Hersteller Manufacturer Fabricante	Schülke & Mayr GmbH				Lysiform Dr. Hans Rosemann GmbH		Cosimed GmbH
		Perform 3 %ig	Mikrocid sensitive liquid unverdünnt	Mikrocid universal liquid unverdünnt	Terralin protect 2 %ig	Lysiformin spezial 0,75 %ig	Alutasan 2000 4 %ig	Cosimed Konzentrat 7,5 %ig
Material Material Material	Desinfektionsmittel Disinfectant Desinfectante							
F641-	skai® Palma	●	●	●	●	●	●	●
	skai® Plata	●	●	●	●	●	●	●
	skai® Palma NF	●	●	●	●	●	●	●
	skai® Pandoria Plus	●	●	●	●	●	●	●
	skai® Pavinto	●	●	●	●	●	●	●
F646-	skai® Parotega NF	●	●	●	●	●	●	●
	skai® Palena	●	●	●	●	●	●	●
	skai® Tundra	●	●	●	●	●	●	●
F647-	skai® Toledo EN	●	●	●	●	●	●	●
	skai® Toronto EN	●	●	●	●	●	●	●
	skai® Topana FLS, skai® Torino FLS	●	●	●	●	●	●	●
	skai® dp Toledo EN base					●		
F507-	skai® Sotega	●	●	●	●	●	●	●
	skai® Sotega Fls	●	●	●	●	●	●	●

	VAH-Listung Stand 01/2019 VAH list as at 01/2019 Lista VAH, versión 01/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	RKI-Listung Stand 10/2017 RKI list as at 10/2017 Lista RKI, versión 10/2017	✓			✓	✓	✓	
	Wirkstoffklasse 2		Alkylamine/ Alkylamide		Glykoldervate	Guandini/ Guandinderivate		Alkylamine/ Alkylamide
	Wirkstoffklasse 1	Peroxidverbindungen	quartäre Ammonium- verbindungen	Alkohol	quartäre Ammonium- verbindungen	quartäre Ammonium- verbindungen	Alkohol	quartäre Ammonium- verbindungen
	Wirksam gegen SARS-CoV-2* Effective against SARS-CoV-2* Medidas efectivas contra el SARS-CoV-2*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Die nebenstehende Matrix zeigt, welche Desinfektionsmittel zur Flächendesinfektion von skai® Polstermaterialien empfehlenswert, bedingt empfehlenswert oder nicht zu empfehlen sind. Diese Einstufungen beruhen auf Erkenntnisse aus einer umfangreichen Testreihe mit den aufgeführten Materialien.

- Desinfektionsmittel, die zur Flächendesinfektion von skai® Polstermaterial empfohlen werden.
- Desinfektionsmittel, die zur Flächendesinfektion von skai® Polstermaterialien bedingt empfohlen werden. So gekennzeichnete Desinfektionsmittel bitte vor dem großflächigen Einsatz an einer verdeckten Stelle prüfen. Falls möglich verdünnt anwenden und nicht über einen längeren Zeitraum einwirken lassen.
- Desinfektionsmittel, die zur Flächendesinfektion von skai® Polstermaterialien nicht zu empfehlen sind.

Die oben abgebildete Tabelle zeigt, welche Desinfektionsmittel zur Flächendesinfektion von skai Polstermaterialien empfehlenswert, bedingt empfehlenswert oder nicht empfehlenswert sind. Diese Einstufungen beruhen auf Erkenntnissen aus einer umfangreichen Testreihe mit den aufgeführten Materialien.

Die Desinfektion von Kontaktflächen ist unerlässlich, um die Übertragung von Krankheitserregern über Haut oder Atemwege auf Menschen, weitgehend zu verhindern. Hierbei ist darauf zu achten, dass neben den geeigneten Desinfektionsmitteln (unter Beachtung der richtigen Mischungsverhältnisse bei Konzentraten), auch die korrekte Durchführung des Desinfektionsvorganges berücksichtigt wird.

Routinemäßige Desinfektionen (insbesondere im öffentlichen und gewerblichen Bereich) der kunstlederbezogenen Polsterflächen sollen einerseits ein hygienisch einwandfreies Ergebnis bringen, andererseits jedoch das Material des Polsters nicht beschädigen oder verändern. Dies wird sichergestellt durch:

1. Verwendung der empfohlenen Mittel
2. Befolgung der angegebenen Mischungsverhältnisse
3. richtige Mengendosierung bei Aufbringen des Mittels
4. richtige Wischtechnik

5. Befolgung der angegebenen Einwirkzeiten
6. Bei groben Verschmutzungen Vorabreinigung wie unter 5.2. beschrieben

Möglichkeiten der materialschonenden und wirksamen Desinfektion:

1. Professionelle Wischdesinfektion

Gleichmäßiges Aufbringen des Desinfektionsmittels durch ein getränktes Tuch unter Berücksichtigung der empfohlenen Einwirkzeit.

2. Professionelle Sprühdesinfektion

Aufbringen des Desinfektionsmittels durch einen Spezial-Schaum-Sprühkopf (aerosolarm) mit anschließender gleichmäßiger Verteilung auf die Polsterfläche, abnehmen (trocken wischen) des verbliebenen Desinfektionsmittels nach der empfohlenen Einwirkzeit.


3. Schnelldesinfektion

Analog zu Pkt. 2, jedoch mit einer sofort anwendbaren Mischung (kein Konzentrat).


Weitere Informationen und Produktempfehlungen zur Desinfektion von Kunstlederposlern finden Sie auf www.rfh-rehatechnik.de im Download-Bereich.

6. Abmessungen und Gewicht

Liegeflächenmaß	65 cm x 200 cm
zulässiges Patientengewicht	max. 135 kg

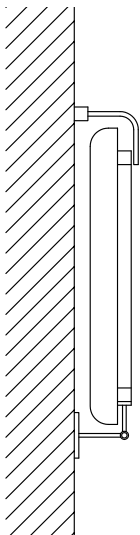

Standardversion

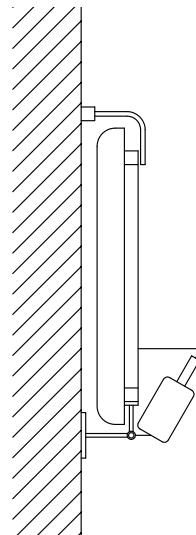

elektrische Version

7. Konformitätserklärung



RFH-Rehatechnik GmbH

Kulmbacher Straße 115 - 95445 Bayreuth

Telefon: 0921 / 151 100 60

Fax: 0921 / 151 100 69

www.rfh-rehatechnik.de - kontakt@rfh-rehatechnik.de

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG EU declaration of conformity

Hersteller
Manufacturer

RFH-Rehatechnik GmbH
Kulmbacher Straße 115
D-95445 Bayreuth

einmalige Registrierungsnummer (SRN)
single registration number

noch nicht anwendbar
yet inapplicable

Der Hersteller trägt die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser EU-Konformitätserklärung.

The manufacturer is entirely responsible for the exposition of this EU – declaration of conformity.

Basis -UDI-DI gemäß Anhang VI Teil C
Basis -UDI-DI defined in accordance to Annex VI
Part C

noch nicht anwendbar
yet inapplicable

Produkt- und Handelsbezeichnung
product- and trade code

WANDKLAPPLIEGE RFH
wall folding couch

Artikelnummer
product code

22.250.00.000 / 22.250.10.000



Klassifizierung laut Anhang VIII
Classification defined in accordance to Annex VIII

Risikoklasse I
risk category I

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU declaration of conformity

Der Hersteller versichert, dass das Produkt - erfasst in dieser Konformitätserklärung - der EU - Verordnung 2017/745 und der Richtlinie RoHS-II 2011/65 entspricht.

The manufacturer ensures, that the product - acquired by this declaration – corresponds to EU regulation 2017/745.

Werden Änderungen am Produkt durchgeführt, die nicht durch den Hersteller autorisiert sind, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

With alterations on this product, that aren't authorized by the manufacturer this declaration will lose its validity.

Der Unterzeichner handelt im Namen der RFH-Rehatechnik GmbH.

The signee negotiates in behalf of RFH-Rehatechnik GmbH.

Bayreuth, 22.03.2021



Jens Richter
Geschäftsführer / director



Rico Freund
Geschäftsführer / director

8. Elektrische Daten (bei Ausführung mit Motor)

U in	220-240 V/50-60Hz
I in	Max. 1,5 A
U out	24 V=, max. 70 VA
Betriebsdauer	2 min/18 min, 10% max. (Bei Überschreitung der Betriebsdauer schaltet der ein gebaute Thermoschalter ab. Nach Abkühlung des Motors ist das Bett wieder betriebsbereit.)
Gerätetyp	B
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 54
Sichere Arbeitslast	220 kg = 185 kg max. Patientengewicht
Netzkabel	H05BQ-F, 2 x 1,0 mm ²

Herausgegeben von:

RFH Rehatechnik GmbH
Kulmbacher Straße 115 - 95445 Bayreuth
Telefon: 0921 151 100 60
Telefax: 0921 151 100 69
email: kontakt@rfh-rehatechnik.de
Internet: www.rfh-rehatechnik.de



Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit vorheriger schriftlicher
Genehmigung des Herausgebers.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Stand 06 / 2021