



Wandklappliege S

Befestigung stirnseitig

Gebrauchsanweisung



Achtung!

Die Wandklappliege darf nicht an Trockenbauwänden montiert werden. Eine Montage und Nutzung ist nur an massiven Wänden, wie aus Beton, Stein, Hohlblock- oder Kalksandsteinziegeln und monolithischem Mauerwerk zulässig. Die Montage der Wandklappliege ist immer von zwei Personen auszuführen.

1. Montage



1. Schritt: Den Standfuß der Wandklappliege ausklappen und die Liege mit dem Befestigungsblech an der Montagestelle platzieren. Die Liegefläche mit Hilfe einer Wasserwaage ausrichten und die Befestigungslöcher an der Montagestelle anreißen.



2. Schritt: Anschließend Löcher bohren und Dübel setzen. Danach kann die Wandklappliege mit 12er Schrauben und Beilagscheiben befestigt werden. Dübel und Schrauben sind kein Bestandteil des Lieferumfangs der RFH-Rehatechnik GmbH.



3. Schritt: Nach der Montage die Liege nach oben klappen. Die Gasdruckfeder wird nun in den beiden Aufnahmen mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schrauben, Muttern und Unterlegschrauben befestigt.



4. Schritt: Die genaue Justierung der Gasfederaufnahme erfolgt mit der Imbusschraube. Zur Sicherung der Positionierung wird das Schiebestück mit Durchmesser 8 durchgebohrt und verschraubt.

2. Reinigung der Kunstlederfläche

Reinigungsempfehlung für skai fashion Produkte - ein Erzeugnis der Konrad Hornschuch AG

- skai-Materialien sind sehr pflegeleicht
- Säubern Sie das Material einfach mit warmen Wasser und einem feuchten Tuch.
- Besonders empfehlenswert ist die Verwendung eines handelsüblichen Micofasertuches.
- Stärkere Verschmutzungen werden einfach unter Zugabe eines milden Reinigungsmittels entfernt.
- Um zu vermeiden das Flecken in das Material eindringen, sollten die Verunreinigungen sofort entfernt werden.
- Bitte benutzen Sie keine Lösungsmittel, Chloride, Poliermittel, synthetische Reinigungsmittel, Wachspoliermittel oder Aerosolsprays.
- Regelmäßige und sorgfältige Pflege garantiert Ihnen langanhaltende Freude an Ihrem hochwertigen Polstermaterial.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel welche Öl oder Fett enthalten.
- skai-Materialien sind nicht beständig gegen chemische und Trockenreinigung.

3. Desinfektionsmittelempfehlung der Firma Hornschuch

Desinfektionsmittelempfehlung der Firma Hornschuch

Sortiment-Nr. No of productline N° de gama	Hersteller Manufacturer Fabricante	Schülke & Mayr GmbH				Lysiform Dr. Hans Rosemann GmbH		CosilMed GmbH
		Perform 3 %ig	Mikrocid sensitive liquid unverdünnt	Mikrocid universal liquid unverdünnt	Terralin protect 2 %ig	Lysiformin spezial 0,75 %ig	Aldasan 2000 4 %ig	CosilMed Konzentrat 7,5 %ig
Material Material Material	Desinfektionsmittel Disinfectant Desinfectante							
F641-	skai* Palma	●	●	●	●	●	●	●
	skai* Plata	●	●	●	●	●	●	●
	skai* Palma NF	●	●	●	●	●	●	●
	skai* Pandoria Plus	●	●	●	●	●	●	●
	skai* Pavinto	●	●	●	●	●	●	●
F646-	skai* Parotega NF	●	●	●	●	●	●	●
	skai* Palena	●	●	●	●	●	●	●
	skai* Tundra	●	●	●	●	●	●	●
F647-	skai* Toledo EN	●	●	●	●	●	●	●
	skai* Toronto EN	●	●	●	●	●	●	●
	skai* Topana FLS, skai* Torino FLS	●	●	●	●	●	●	●
	skai* dp Toledo EN base					●		
F607	skai* Sotega	●	●	●	●	●	●	●

	VAH-Listung Stand 01/2019 VAH list as at 01/2019 Lista VAH, versión 01/2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	RKI-Listung Stand 10/2017 RKI list as at 10/2017 Lista RKI, versión 10/2017	✓			✓	✓	✓	
	Wirkstoffklasse 2		Alkylamine/ Alkylamide		Glykoldervate	Guandini/ Guandinderivate		Alkylamine/ Alkylamide
	Wirkstoffklasse 1	Peroxidverbindungen	quartäre Ammonium- verbindungen	Alkohol	quartäre Ammonium- verbindungen	quartäre Ammonium- verbindungen	Alkohol	quartäre Ammonium- verbindungen
	Wirksam gegen SARS-CoV-2* Effective against SARS-CoV-2* Medidas efectivas contra el SARS-CoV-2*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Die nebenstehende Matrix zeigt, welche Desinfektionsmittel zur Flächendesinfektion von skai® Polstermaterialien empfehlenswert, bedingt empfehlenswert oder nicht zu empfehlen sind. Diese Einstufungen beruhen auf Erkenntnisse aus einer umfangreichen Testreihe mit den aufgeführten Materialien.

- Desinfektionsmittel, die zur Flächendesinfektion von skai® Polstermaterial empfohlen werden.
- Desinfektionsmittel, die zur Flächendesinfektion von skai® Polstermaterialien bedingt empfohlen werden. So gekennzeichnete Desinfektionsmittel bitte vor dem großflächigen Einsatz an einer verdeckten Stelle prüfen. Falls möglich verdünnt anwenden und nicht über einen längeren Zeitraum einwirken lassen.
- Desinfektionsmittel, die zur Flächendesinfektion von skai® Polstermaterialien nicht zu empfehlen sind.

Die oben abgebildete Tabelle zeigt, welche Desinfektionsmittel zur Flächendesinfektion von skai Polstermaterialien empfehlenswert, bedingt empfehlenswert oder nicht empfehlenswert sind. Diese Einstufungen beruhen auf Erkenntnissen aus einer umfangreichen Testreihe mit den aufgeführten Materialien.

Die Desinfektion von Kontaktflächen ist unerlässlich, um die Übertragung von Krankheitserregern über Haut oder Atemwege auf Menschen, weitgehend zu verhindern. Hierbei ist darauf zu achten, dass neben den geeigneten Desinfektionsmitteln (unter Beachtung der richtigen Mischungsverhältnisse bei Konzentraten), auch die korrekte Durchführung des Desinfektionsvorganges berücksichtigt wird.

Routinemäßige Desinfektionen (insbesondere im öffentlichen und gewerblichen Bereich) der kunstlederbezogenen Polsterflächen sollen einerseits ein hygienisch einwandfreies Ergebnis bringen, andererseits jedoch das Material des Polsters nicht beschädigen oder verändern. Dies wird sichergestellt durch:

1. Verwendung der empfohlenen Mittel
2. Befolgung der angegebenen Mischungsverhältnisse
3. richtige Mengendosierung bei Aufbringen des Mittels
4. richtige Wischtechnik

5. Befolgung der angegebenen Einwirkzeiten
6. Bei groben Verschmutzungen Vorabreinigung wie unter 5.2. beschrieben

Möglichkeiten der materialschonenden und wirksamen Desinfektion:

1. Professionelle Wischdesinfektion

Gleichmäßiges Aufbringen des Desinfektionsmittels durch ein getränktes Tuch unter Berücksichtigung der empfohlenen Einwirkzeit.

2. Professionelle Sprühdesinfektion

Aufbringen des Desinfektionsmittels durch einen Spezial-Schaum-Sprühkopf (aerosolarm) mit anschließender gleichmäßiger Verteilung auf die Polsterfläche, abnehmen (trocken wischen) des verbliebenen Desinfektionsmittels nach der empfohlenen Einwirkzeit.

3. Schnelldesinfektion

Analog zu Pkt. 2, jedoch mit einer sofort anwendbaren Mischung (kein Konzentrat).

Weitere Informationen und Produktempfehlungen zur Desinfektion von Kunstlederposltern finden Sie auf www.rfh-rehatechnik.de im Download-Bereich.

4. Konformitätserklärung



RFH-Rehatechnik GmbH

Kulmbacher Straße 115 - 95445 Bayreuth

Telefon: 0921 / 151 100 60

Fax: 0921 / 151 100 69

www.rfh-rehatechnik.de - kontakt@rfh-rehatechnik.de

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG EU declaration of conformity

Hersteller
Manufacturer

RFH-Rehatechnik GmbH
Kulmbacher Straße 115
D-95445 Bayreuth

einmalige Registrierungsnummer (SRN)
single registration number

noch nicht anwendbar
yet inapplicable

Der Hersteller trägt die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser EU-Konformitätserklärung.

The manufacturer is entirely responsible for the exposition of this EU – declaration of conformity.

Basis -UDI-DI gemäß Anhang VI Teil C
Basis -UDI-DI defined in accordance to Annex VI
Part C

noch nicht anwendbar
yet inapplicable

Produkt- und Handelsbezeichnung
product- and trade code

WANDKLAPPLIEGE RFH
wall folding couch

Artikelnummer
product code

22.250.00.000 / 22.250.10.000



Klassifizierung laut Anhang VIII
Classification defined in accordance to Annex VIII

Risikoklasse I
risk category I

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU declaration of conformity

Der Hersteller versichert, dass das Produkt - erfasst in dieser Konformitätserklärung - der EU - Verordnung 2017/745 und der Richtlinie RoHS-II 2011/65 entspricht.

The manufacturer ensures, that the product - acquired by this declaration – corresponds to EU regulation 2017/745.

Werden Änderungen am Produkt durchgeführt, die nicht durch den Hersteller autorisiert sind, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

With alterations on this product, that aren't authorized by the manufacturer this declaration will lose its validity.

Der Unterzeichner handelt im Namen der RFH-Rehatechnik GmbH.

The signee negotiates in behalf of RFH-Rehatechnik GmbH.

Bayreuth, 22.03.2021



Jens Richter
Geschäftsführer / director



Rico Freund
Geschäftsführer / director

5. Abmessungen und Gewicht

Liegeflächenmaß 65 cm x 200 cm

Gewicht Wandklappliege 32 kg

zulässiges Patientengewicht max. 135 kg

Herausgegeben von:

RFH Rehatechnik GmbH
Kulmbacher Straße 115 - 95445 Bayreuth
Telefon: 0921 151 100 60
Telefax: 0921 151 100 69
email: kontakt@rfh-rehatechnik.de
Internet: www.rfh-rehatechnik.de



Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit vorheriger schriftlicher
Genehmigung des Herausgebers.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Stand 06 / 2021