

Produkt-Checkliste für Anwender

FUNKTIONSPRÜFUNG	in Ordnung	defekt	Mängelbeschreibung
Antriebssystem mit Handbedienung: Alle Motoren bei allen Funktionen bis in die Grenzlagen zum automatischen Abschalten verfahren um sichzustellen das:			
die Bettmechanik leichtgängig, ohne Kollisionen oder Blockaden arbeitet			
keine Kabel gequetscht oder überdehnt, Steckverbindungen nicht auseinander gezogen werden			
die Anschlußkabel der Motoren in der Kontrollbox nicht vertauscht sind und die Symbole auf der Handbedienung mit der Motorfunktion übereinstimmen			
die Motoren ohne auffällige Geräuschentwicklung laufen			
die Endlagenabschaltung der Motoren einwandfrei funktioniert			
Manuelle Verstellungen:			
<i>Holzseitengitter:</i> Leichtgängiger Lauf in den Führungsschienen? Sicheres Einrasten in hochgestellter Position? Absenken erst nach leichtem Anheben der Seitenholme und Drücken des Auslöseknopfes möglich?			
<i>Metallseitengitter:</i> Absenken des Seitengitters durch Ziehen der beiden Zug-schnäpper möglich?			
<i>Lenkrollen:</i> Sichere Bremswirkung? Prüfung bei festgestellten Bremsen durch Ziehen und Schieben des Bettes.			
SICHTPRÜFUNG	in Ordnung	defekt	Mängelbeschreibung
<i>Netzkabel:</i> keine Abschürfungen, Knickstellen, blanke Drähte, Druckstellen oder poröse Oberflächen			
<i>Handschalte:</i> Kabel und Gehäuse frei von Beschädigungen?			
<i>Seitengitter:</i> Frei von Beschädigungen?			
Fester Sitz der Imbusschrauben an Kopf- oder Fußbrett?			

Notizen:
